

Was genau ist Smartlipo MPX?

Smartlipo MPX ist ein lasergestütztes, minimal-invasives Verfahren zur Entfernung von störenden Fettpolstern, ähnlich einer Fettabsaugung. Doch Smartlipo MPX erzeugt gleichzeitig eine Straffung des behandelten Hautareals und ist im Gegensatz zur normalen Liposuktion gut für kleinere Regionen des Körpers geeignet.

Was bedeutet minimal-invasiv?

Minimal-invasiv ist eine Bezeichnung aus der Medizin. Sie gibt an, dass bei einer medizinischen Behandlung entweder gar keine Instrumente (nichtinvasiv) in den Körper eindringen oder nur in geringem Maße (minimal-invasiv).

Wie funktioniert Smartlipo MPX?

Bei einer Smartlipo MPX Behandlung wird eine 1 mm breite Kanüle in die Haut eingeführt. Eine in der Kanüle angebrachte Laserfaser gibt Energie direkt in die Fettzellen ab. Diese zerteilen und verflüssigen sich hierdurch. Gleichzeitig koaguliert das umliegende Gewebe, daraus resultiert ein weiterer angenehmer Effekt: die Haut wird gestrafft.

Ist eine Vollnarkose nötig?

Nein, in den meisten Fällen reicht eine örtliche Betäubung am zu behandelnden Areal aus. Die Entscheidung für eine Vollnarkose ist abhängig von der Größe und der Lokalisation der zu behandelnden Körperstelle. Ihr Arzt wird mit Ihnen dieses Thema ausführlich besprechen.

Ist eine Behandlung unangenehm?

Normalerweise haben Sie während der Behandlung keine Schmerzen. Die zu behandelnde Region wird lokal betäubt, so dass Sie keine Unannehmlichkeiten während der Behandlung haben. Es kann sein, dass Sie einen leichten Druck spüren, wenn die Laserfaser hin und her bewegt wird.

Wie lange dauert eine Behandlung?

Die Dauer einer Behandlung ist abhängig von der Größe und Lokalisation der zu behandelnden Körperregion. Auch das zu entfernende Volumen spielt eine Rolle. Man kann aber sagen, dass zwischen 1-3 Stunden zu erwarten sind.



Welche Stellen am Körper können behandelt werden?

Eine Behandlung mit Smartlipo MPX ist an allen Stellen des Körpers gut geeignet. Ideal ist eine Behandlung an Armen, Hals, Kinn, Bauch, Taille, „Reiterhosen“, inneren und äußeren Oberschenkeln und Knie.

Wie lange dauert die Erholungsphase?

Sie tragen nach dem Eingriff einen Kompressionsverband der abhängig vom behandelten Areal ca. zwei Tag getragen werden muss. Sie können nach ca. einer Woche wieder Ihrem gewohnten Alltag nachgehen.

Entstehen Schwellungen?

Das Entstehen von Schwellungen hängt davon ab wie Sie auf den Eingriff reagieren. Sollten Schwellungen auftreten, klingen diese nach ca. 1-2 Tagen wieder ab.

Wird ein Eingriff von der Krankenkasse bezahlt?

In den meisten Fällen nicht. Die Behandlung mit Smartlipo MPX ist ein rein ästhetischer Eingriff und wird somit nicht von den Krankenkassen bezahlt.

Wann sehe ich erste Ergebnisse?

Schon nach einer Woche können Sie erste Ergebnisse sehen, mit einer stetigen Verbesserung des Resultats über 3 bis 6 Monate hin.